




PROBENENTNAHME

1. Führen Sie das gesamte weiche Ende des Tupfers direkt in Ihr Nasenloch ein, weniger als 2-2,5 cm oder bis Sie einen Widerstand spüren.
2. Drehen Sie den Tupfer mehrmals gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase.
3. Entfernen Sie vorsichtig den Tupfer. Wiederholen Sie mit demselben Tupfer die Schritte 1-2 in Ihrem anderen Nasenloch mit demselben Ende des Tupfers.

PROBENVORBEREITUNG

1. Den Tupfer mit der Probe in das Extraktionsröhrchen geben. Den Tupfer drei bis fünf (3 - 5) Mal rollen. Lassen Sie den Tupfer 1 Minute lang im Extraktionspuffer.
2. Das Extraktionsröhrchen mit den Fingern zusammendrücken und die Lösung so weit wie möglich aus dem Tupfer ausdrücken. Entsorgen Sie den gebrauchten Tupfer, indem Sie ihn abbrechen und die Tropferkappe schließen.
3. Die Kappeneinheit wieder in das Extraktionsröhrchen einsetzen. Verwenden Sie die Extraktionslösung als Testprobe.



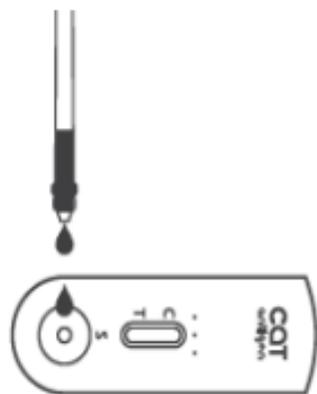

Positive



Negative



Invalid

VERFAHREN

1. Bringen Sie die Kit-Komponenten vor der Prüfung auf Raumtemperatur.
2. Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie die Testkassette. Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort verwendet werden. Bitte führen Sie die Probenentnahme und -vorbereitung wie obenbeschrieben durch.
3. Das Extraktionsröhrchen umdrehen und 3 Tropfen (50-70 μL) der Testprobe durch leichtes Zusammendrücken des Extraktionsröhrchens in die Probenvertiefung geben.
4. Die Ergebnisse nach 15 Minuten ablesen.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

POSITIV: Wenn innerhalb von 15 Minuten zwei farbige Bänder (Ereignis, wenn es schwach ist) auftreten, wobei sich ein farbiges Band in der Kontrollzone (C) und ein anderes in der Testzone (T) befindet, ist das Testergebnis positiv.

NEGATIV: Wenn innerhalb von 15 Minuten kein farbiges Band in der Testzone (T) erscheint, ist das Testergebnis negativ.

UNGÜLTIG: Das Testergebnis ist ungültig, wenn sich innerhalb von 15 Minuten kein farbiges Band in der Kontrollzone (C) befindet.